

HX2AXF 系列射频电源使用说明

尊敬的用户：

感谢您选用本公司 HX2A 系列产品，在使用前，请仔细阅读产品使用说明书，以免因使用不当，给您造成不必要的损失。

在使用过程中，如出现质量问题，请通过代理商或者直接发邮件至 info@zxhexin.com.cn 和我们取得联系，您的宝贵意见和建议，将是我们不断升级产品的动力。

一、产品概况



图 1：HX2AXF 射频电源外观图

HX2AXF 射频电源是我司专门为美容行业打造的冰电波拉皮、祛皱美容仪器、E 光等美容仪器所研制，其技术参数如下：

输入电压：12VDC @10A

输出频率：2M & 10M 【X=2，输出 2MHz, X=A 输出 10MHz】

输出功率：100W Max

传输方式：50 欧姆同轴电缆

谐波：负载匹配时，10% (3DB) Max

控制方式：PWM 脉宽调制

美容仪器核心部件供应商，五年诚挚之作，助推你飞扬！！
更多最新产品资讯，请登录 <http://www.zxhexin.com.cn>

体 积: 150mm(L)*150mm(W)*65mm(H)
重 量: 1.2Kg

二、 接口说明

BR2A 系列射频电源接口如图 2 所示



图 2: BR2A 系列电源接口示意

接口序号	名称	特性	备注
①	保险	10A	
②	供电指示	Red 12V 正常 Led 亮	
③	供电输入	12Vdc 输入端子	
④	控制接口	Gnd	控制信号地
		Pow	能量输出控制, 高电平有效
		Plu	能量输出控制, 2KHz 以上 PWM 信号
		Sel	枪头切换控制, 高电平有效, 默认 RF1 输出
⑤	射频输出	Q9 音频接口	必须使用 50 欧姆同轴电缆, 软件控制切换输出端口为 RF1 或者 RF2
⑥		Q9 音频接口	

三、 产品特点

- α 产品体积小, 重量轻, 方便安装
- α 输出频率稳定, 频率误差小, 发热效率, 穿透深度深
- α 低压直流输入, 军工品质, 安全高效
- α 双通道输出, 方便拓展连接, 不需要外接其他器件即可满足两路射频源需求
- α 可与市场上绝大多数 IPL 和 RF 治疗头匹配使用



四、 注意事项

本产品使用 12Vdc 供电，有正负极性区分，请在使用前，仔细确认电源电压以及输出极性，以免接错，造成不必要的损失。

本产品出厂时，已经全部检验合格，请勿撕开保修标签，拆开外壳，更改参数，出现故障请送回厂家检修。

请将电源安装在通风，干燥的位置。

五、 质量保障

按照国家有关质保规定，本产品施行出厂为期壹年的无偿质保。质保期外，我们将继续为您提供有偿维修服务。

本条例适用于和鑫科技生产的各类产品。凡通过正规渠道购买的 Hexin 产品，均享受本公司提供的售后服务。但以下情况除外：

1. 保修易碎标签损毁；
2. 人为造成的产品损坏，包括接错电源、PCB 底板损坏等；
3. 超过三包有效期的；
4. 未经授权，擅自对产品维修或改动；
5. 曾因错误操作、接线、疏忽使用、意外事故或其它不可以抗力而引起的损坏；
6. 无有效质保卡及有效购买凭证的；
7. 擅自涂改质保卡凭证的；
8. 产品上的条形码被涂改、删除、丢失、移动或其它损坏；
9. 不按照说明书上的安装示意安装而造成损坏；
10. 故障件返回过程中由于不适当的包装或运输中操作不当造成的产品损坏。

售后服务：0516- 85553837 - 816

我们将在下一个工作日给您回复。

六、 联系方式

徐州和鑫电子科技有限公司

网址：<http://www.xzhxin.com.cn>

地址：江苏 徐州黄河北路 90 号

邮编：221003

电话：15852186856

本公司保留随时更改上述产品硬件、软件参数而不通知的权利